

Steplight SL 1

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ФОТОПОЛИМЕРИЗАЦИИ

Для использования только профессиональными стоматологами соответственно показаниям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- 1) STEPLIGHT SL 1 не предназначен для финальной полимеризации.
- 2) Устройство предназначено для эксплуатации в помещениях.
- 3) Подключайте прибор только к розетке с заземлением.
- 4) Располагайте устройство вдали от прямого солнечного света или других источников тепла, в чистом, хорошо проветриваемом помещении, в местах, где нет вибрации.
- 5) При чистке или замене деталей отключайте устройство от сети.
- 6) Не смотрите на лампу, когда она включена.
- 7) Во избежание ожогов не касайтесь лампы и теплового фильтра во время работы устройства, а также в течение некоторого времени после его выключения.
- 8) При повреждении теплового фильтра замените его до эксплуатации устройства.

НАЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ УСТРОЙСТВА

- 1) Главный выключатель / индикатор питания.
Когда главный выключатель включен, индикатор горит.
- 2) Выключатель лампы.
Для включения лампы аккуратно передвиньте рычажок выключателя вверх или вниз.
- 3) Светофильтр.
- 4) Корпус.
- 5) Электрический шнур.
- 6) Галогенная лампа.
- 7) Тепловой фильтр, отсекающий инфракрасное излучение.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Подключите устройство к сети.
2. Включите главный выключатель. Индикатор питания загорается.
3. Поместите полимеризуемую конструкцию в "световое пятно" под лампу за светофильтром и активируйте устройство, нажав рычажок выключателя.

Замечания:

- 1) Лампа автоматически выключится через 10 секунд после отпускания рычажка. Пока лампа включена, непрерывно работает вентилятор.
- 2) Если выключить полимеризатор главным выключателем во время работы лампы, подождите несколько секунд перед повторным включением прибора. В противном случае это отрицательно скажется на сроке службы лампы.
- 3) Если полимеризуемую конструкцию поместить вне "светового пятна", эффективность полимеризации будет снижена.
- 4) При интенсивном использовании полимеризатора лампа может не включаться или самопроизвольно выключаться. Это сделано с целью защиты от перегрева. В этом случае дайте остынуть лампе, после чего ее можно включать снова.

ЗАМЕНА ГАЛОГЕННОЙ ЛАМПЫ

Всегда используйте специальную лампу для GC STEPLIGHT SL 1. Использование любой другой лампы может привести к неэффективной полимеризации или поломке устройства.

1. Выключите полимеризатор главным выключателем и отключите устройство от сети.
2. Убедитесь что заменяемая лампа холодная.
3. Выкрутите два винта (а) в нижней части корпуса и снимите его, поднимая вверх.
4. Выкрутите винт сбоку крышки лампы и снимите ее.
5. Снимите светофильтр.

Чтобы освободить зажимы растяните края светофильтра в разные стороны, за тем потяните его на себя.

Замечание:

Не следует слишком сильно деформировать светофильтр, иначе можно повредить его.

6. Чтобы извлечь лампу, потяните фиксатор на себя.
7. Вставьте новую лампу.

Обращайтесь с новой лампой осторожно. Чтобы не испачкать ее пальцами на давайте перчатки или используйте сухую тряпочку. При установке лампы вставляйте ее в разъем до упора, скругленная часть лампы (б) должна быть спереди.

Предупреждение:

При установке новой лампы следите, что бы пальцы не попали между лампой и фиксатором (в).

8. Произведите сборку в обратном порядке: установите светофильтр, крышку лампы и корпус.

Замечание: Устанавливайте корпус так, чтобы название полимеризатора было справа от вас, если смотреть на прибор спереди.

ОБСЛУЖИВАНИЕ STEPLIGHT SL 1

1. Не пытайтесь модифицировать устройство.

При очистке полимеризатора всегда выключайте его и отключайте от сети.

Периодически проверяйте устройство на предмет работоспособности.

2. Очищайте тепловой фильтр, если он загрязнился, либо если наблюдается снижение эффективности полимеризации.

Для очистки теплового фильтра и корпуса полимеризатора смочите мягкую тряпочку или салфетку теплым слабым раствором моющего средства, хорошо отожмите ее, и протирайте.

Избегайте применения сильных растворителей, бензина и пр.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

При возникновении затруднений сначала проверьте по таблице:

Симптом	Возможная неисправность	Способ устранения
Индикатор включения не загорается при включенном главном выключателе	Устройство не подключено к сети	Подключите устройство к сети
При нажатии на рыча	Перегорела лампа	Замените лампу, как описано в

жюк включения лампы она не загорается		соответствующем разделе
	Лампа плохо вставлена в разъем	Вставьте лампу в разъем до упора
	Устройство непрерывно используется в течение длительного времени	Сработала защита лампы от перегрева. Дайте устройству остыть.

ГАРАНТИЯ / ЗАМЕНА

Предоставляется гарантия сроком на 1 год от даты приобретения.

При поломке в течение гарантийного срока ремонт производится бесплатно при условии, что прибор эксплуатировался при нормальных условиях с соблюдением инструкции по эксплуатации.

Замечание:

На расходные части (такие как лампа) гарантия не распространяется.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание	120 В 60 Гц	220 / 230 В 50 Гц
Потребление тока	180 Вт 1.7 А	
Питание лампы	100 В 150 Вт	
Эксплуатация при температуре	от +10 до +30 °С	
Теплопоглощающий фильтр	Специальное стекло 50 мм в диаметре, 4 мм толщиной	
Габариты	111 мм (ширина) x 210 мм (глубина) x 275 мм (высота)	
Масса	2 кг	

Спецификация может изменяться