

Unifast TRAD

МНОГОЦЕЛЕВАЯ АКРИЛОВАЯ ПЛАСТМАССА

GC UNIFAST Trad - является быстротвердеющей самоотверждаемой акриловой пластмассой, имеющей множество применений в стоматологии. Пластмассой можно работать как по технике полимеризации под давлением, так и по технике нанесения кистью.

Для использования только профессиональными стоматологами соответственно показаниям.

ПОКАЗАНИЯ

1. Починка протезов.
2. Изготовление временных коронок.
3. Изготовление индивидуальных оттисковых ложек.
4. Изготовление ортодонтических пластин, шин, регистрации прикуса и других общих целей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

В редких случаях у некоторых лиц продукт может вызвать чувствительность. В этом случае прекратите использование продукта и обратитесь к врачу соответствующей специализации.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

А. ТЕХНИКА ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рекомендуемое соотношение порошок / жидкость составляет 1 г порошка (первое деление мерника порошка) на 0.5 мл жидкости (первое деление мерника жидкости) .

1. Поместите требуемое количество жидкости в резиновую чашечку как описано ниже:
 - а) Снимите защитный колпачок и накрутите дозировочную насадку (рис. 1) .
 - б) Наливайте жидкость в прилагаемый мерник (рис. 2) до достижения нижним мениском жидкости требуемого деления мерника (рис. 3)
 - в) Закройте бутылочку во избежание испарения жидкости
2. Добавьте порошок в жидкость и тщательно замешивайте в течение 10 15 секунд.
3. Смесь достигает тестообразной консистенции через 20 - 30 секунд после начала замешивания. Все манипуляции должны быть завершены в течение 2 х минут после начала замешивания, далее материал твердеет.

Б. ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ КИСТЬЮ

Используйте стандартную технику.

ХРАНЕНИЕ

Храните в прохладном месте вне досягаемости прямого солнечного света.

(Срок хранения: 3 года)

ЗАМЕЧАНИЯ

1. Не используйте порошок или жидкость GC UNIFAST Trad с компонентами любых других акриловых пластмасс.
2. После каждого использования удаляйте остатки пластмассы сухой тряпочкой.
3. Капли разлитой жидкости следует промокнуть сухой шерстяной тряпочкой.

УПАКОВКА

1. Бутылочки с порошком, 35 г, 100 г, 250 г, 1 кг.
2. Бутылочки с жидкостью, 100 г (104 мл) , 250 г (260 мл).

ОТТЕНКИ

1. Коронковые оттенки: Слоновая кость, Темная слоновая кость, Светлая слоновая кость.
2. Десневые оттенки : Розовый # 3, Темно розовый # 4, Естественный светло розовый # 6, Естественный темно розовый # 7, Светло розовый # 8 (с прожилками), Розовый X.

ВНИМАНИЕ

1. Жидкость ОГНЕОПАСНА. Избегайте источников открытого пламени.
2. При попадании в глаза немедленно промойте водой и обратитесь к врачу.