

# schülke →



Быстрая дезинфекция поверхностей изделий медицинского назначения и медицинской техники, а также дезинфекция поверхностей всех видов.

## МИКРОЦИД РФ® Ликвид / Салфетки

### Наше преимущество:

- Готовые к применению.
- Без альдегида.
- Широкий спектр действия за короткое время.
- Хорошая переносимость материалами.
- Быстрое высыхание без следов.
- Приятный запах.

### Область применения

Для дезинфекции изделий медицинского назначения (СЕ 0297) и поверхностей всех видов, напр: операционных столов, пеленальных столов, терапевтических ванн, медицинских смотровых кушеток, ручек дверей, туалетов, очков, для быстрой дезинфекции в медицинских учреждениях, в службе скорой помощи, на предприятиях фармацевтической и пищевой промышленности, коммунальных объектах, в учреждениях социального обеспечения и детских учреждениях, в парикмахерских и косметических салонах, в быту.

### Указания по применению

#### Рабочий раствор:

Микроцид Ликвид нанести неразбавленным на медицинские продукты, а также на предметы и поверхности и оставить действовать.

Следить за полным увлажнением поверхности (напр., 40мл/м<sup>2</sup>). В случае необходимости лишнее количество препарата удалить одноразовой салфеткой.

#### Дезинфицирующие салфетки:

Поверхность тщательно протереть салфеткой, добиваясь её равномерного увлажнения. Для больших поверхностей, в случае необходимости, использовать несколько салфеток.

(1 флакон содержит 150 готовых к применению салфеток).

### Особые указания

Не глотать, избегать контакта с глазами, не обрабатывать поверхности, чувствительные к спиртам (напр., из акрилового стекла).

### Микробиологическая активность

Обладают антимикробной активностью в отношении вирусов (ВИЧ/Гепатита В/Рота), бактерий, включая туберкулез, грибов.

### Данные о препарате

#### Состав:

Микроцид® РФ: 100 г раствора содержат: 40 г пропан-2-ола, 22 г пропан-1-ола.

Содержание раствора действующего вещества на салфетку: В одном флаконе на 150 штук салфеток используется 320 г раствора действующего вещества. Соответственно в каждой салфетке содержится 2,13 г раствора действующего вещества.

#### Физико-химические данные:

##### Концентрат:

Внешний вид:	прозрачная, бесцветная жидкость
Плотность (20 °С):	ок. 0,88 г/см <sup>3</sup>
pH:	6,5 – 8,5
Температура возгорания:	24 °С (DIN 51 755)

### Формы поставки

Флакон 1 л

Флакон (150 салфеток)

Принадлежности: распылительная насадка на флакон 1 л



# МИКРОЦИД РФ® Ликвид / Салфетки

## Маркировка по степеням опасности по нормам ЕС

- Xi:** раздражающее действие.
- R10:** воспламеняется.
- R41:** опасность серьезного повреждения глаз.
- R67:** пары могут вызвать сонливость и оцепенелость.
- S23:** не вдыхать аэрозоль.
- S26:** при попадании в глаза сразу же промыть водой и обратиться к врачу.
- S39:** работать в защитных очках или маске.
- S51:** применять в хорошо проветриваемых помещениях.

## Хранение

Хранить в плотно закрытых флаконах, в хорошо проветриваемых помещениях при комнатной температуре, отдельно от лекарств. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Хранить в местах недоступных для детей.



Компания SCHÜLKE & MAYR GMBH сертифицирована в соответствии с DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 и DIN EN ISO 13485 (регистрационный номер: 004567MP23). Компания обладает одобренной системой управления состоянием окружающей среды в соответствии с предписанием (Регистрационный номер: D-150-00003).

### Представительство Шюлке & Майр в СНГ и России

119606 Москва | Проспект Вернадского 84 | 2-ой гостиничный корпус | Тел: +7(495)436-06-38 / +7(495)436-02-28  
Эл.адрес: schuelke\_rus@mail.ru

Schülke & Mayr Ges.m.b.H. | 1070 Wien | AUSTRIA | Tel: +43(1)523 25 01 | Fax: +43(1)523 25 01 60 | e-mail: office.austria@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH | 22840 Norderstedt | GERMANY | www.schuelke.com

08.10 / westwerk

